


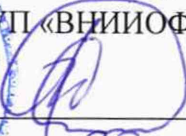

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по инновациям  
ФГУП «ВНИИОФИ»

  
И.С. Филимонов

« 20 » июня 2019 г.

ГСИ. ДИОПТРИМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000

**Методика поверки**


**№ МП 032.М44-19**

Главный метролог  
ФГУП «ВНИИОФИ»

  
С.Н. Негода

« 20 » июня 2019 г.

Разработчик:  
Начальник сектора  
ФГУП «ВНИИОФИ»

  
Э.Ю. Левина

Москва 2019г.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	3
1 Операции поверки	3
2 Средства поверки	4
3 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности	4
4 Условия поверки	4
5 Подготовка к поверке	5
6 Порядок проведения поверки	5
7 Оформление результатов поверки	12
Приложение А	13

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на диоптриметры автоматические модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000 (далее по тексту – прибор), изготовленные компанией «Huvitz Co., Ltd.» Республика Корея, предназначенные для измерения вершинной рефракции и призматического действия очковых линз, а также для ориентирования и маркировки нефацетированных линз, и для проверки правильности установки линз в очковых оправах, и устанавливает порядок, методы и средства проведения первичной и периодических поверок.

Интервал между поверками – 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

1.2 При проведении поверки должны быть выполнены операции, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование Операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
Внешний осмотр	6.1	Да	Да
Опробование и идентификация программного обеспечения.	6.2	Да	Да
Определение метрологических характеристик:	6.3		
Проверка диапазона измерений сферической вершинной рефракции	6.3.1	Да	Нет
Определение абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции	6.3.2	Да	Да
Проверка диапазона измерений призматического действия	6.3.3	Да	Нет
Определение абсолютной погрешности измерений призматического действия	6.3.4	Да	Да
Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра	6.3.5	Да	Да
Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси	6.3.6	Да	Да

1.3 При получении отрицательных результатов, при проведении той или иной операции, поверка прекращается.

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяются средства поверки, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.3.1- 6.3.5	Комплекты приспособлений для поверки диоптриметров КПП-3Р, рег.№56132-14 –используется для первичных и периодических поверок: Диапазон значений задней вершинной рефракции сферических мер: от - 25 до + 25 дптр; пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения задней вершинной рефракции от $\pm 0,02$ до $\pm 0,08$ дптр; Диапазон значений призматического действия мер: от 2 до 10 пр дптр; пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения призматического действия от $\pm 0,06$ до $\pm 0,12$ пр дптр;  Лупа ЛИ-4-10Х ГОСТ 25706-83
6.3.1- 6.3.5	Комплекты приспособлений для поверки диоптриметров КПП-2Р, рег.№52100-12-используется для периодических поверок: Диапазон значений задней вершинной рефракции сферических мер: от - 25 до + 25 дптр; пределы допускаемой абсолютной погрешности задней вершинной рефракции от $\pm 0,02$ до $\pm 0,06$ дптр; Призма-клин с номинальным значением призматического действия 6,0 пр дптр со скошенной гранью. пределы допускаемой абсолютной погрешности значения призматического действия $\pm 0,06$ пр дптр

2.2 Средства поверки, указанные в таблице 2 должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке.

2.3 Допускается применение других средств, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К проведению поверки приборов допускаются лица:

- прошедшие обучение на право проведения поверки по данному виду измерений;
- изучившие настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на прибор;

- имеющие группу по электробезопасности не ниже II и удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В.

3.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, приведенные в эксплуатационной документации прибора.

### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, °С  $20 \pm 5$
- относительная влажность воздуха, % от 40 до 80 (HLM-1, HLM-9000)  
от 50 до 80 (HLM-7000)

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106

4.2 Не допускается попадание на прибор прямых солнечных лучей. Поверку проводить в затененном помещении.

## 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Перед началом поверки приборы необходимо выдержать в лабораторном помещении при температуре от 20 до 25 °С в течение не менее 2 часов, если приборы были транспортированы.

5.2 Установить прибор на устойчивую горизонтальную поверхность.

5.3 Провести подготовку прибора к измерениям в соответствии с указаниями его Руководства по эксплуатации.

5.4 Убедиться, что выключатель прибора находится в положении «О» (выключено). Воткнуть силовой кабель в разъем сетевого питания прибора. Затем вставить вилку в розетку сети электропитания.

5.5 Включить прибор, нажав переключатель питания, расположенный на левой боковой (для модели НЛМ-9000 - задней) панели основного блока (положение «I»).

5.6 Для исключения ошибок при проведении измерений, проверить объектив прибора на наличие загрязнений. При наличии загрязнений необходимо протереть поверхность объектива мягкой салфеткой, без использования растворов или удалить пыль с помощью резиновой груши.

5.7 Подготовить к работе комплект приспособлений для поверки диоптриметров КПП-3Р (далее комплект КПП-3Р) (Комплект приспособлений для поверки диоптриметров КПП-2Р - далее комплект КПП-2Р) в соответствии с Руководством по его эксплуатации. При необходимости следует протереть поверхность мер мягкой чистой салфеткой, без использования растворов или удалить пыль с помощью резиновой груши.

## 6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

### 6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре приборов должно быть установлено:

- соответствие комплектности прибора с руководством по эксплуатации;
- отсутствие механических повреждений корпуса прибора, дисплея, элементов управления;
- наличие маркировки (наименование или товарный знак завода-изготовителя, тип и заводской номер прибора, год выпуска);
- исправность соединительных проводов.

Прибор считают прошедшим операцию поверки, если:

- комплектность прибора соответствует руководству по эксплуатации;
- отсутствуют механические повреждения корпуса прибора, дисплея, элементов управления;
- на шильдике прибора указаны тип и заводской номер прибора, год выпуска;
- соединительные провода прибора исправны.

### 6.2 Опробование и идентификация программного обеспечения

6.2.1 Идентификация программного обеспечения: включить прибор, нажав кнопку питания прибора. После включения на экране высвечивается информация о приборе, где отобразится номер версии ПО.

Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части программного обеспечения систем приведены в таблице 3

Таблица 3 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	HLM
Номер версии (идентификационный номер) ПО для модели HLM-1	не ниже 1.00.02A
Номер версии (идентификационный номер) ПО для модели HLM-7000	не ниже 1.00.00A
Номер версии (идентификационный номер) ПО для модели HLM-9000	не ниже 1.01.04A
Цифровой идентификатор ПО	Данные являются собственностью производителя и являются защищёнными для доступа дилера и пользователей

6.2.2 При опробовании прибора должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- подвижные части прибора должны двигаться плавно, без заеданий, устройства фиксации линз, маркирующего устройства должны быть исправны;
- кнопки управления должны быть исправны и иметь соответствующие надписи, указывающие их назначение;
- показание по шкале диоптрий должно быть «0,00» при свободной опоре для линз и изменяться при вводе линзы в держатель.

Прибор считают прошедшим операцию поверки, если:

- номер версии программного обеспечения соответствует таблице 3;
- подвижные части диоптриметра двигаются плавно, без заеданий, устройства фиксации линз, маркирующего устройства исправны;
- кнопки управления исправны и имеют соответствующие надписи, указывающие их назначение;
- показание по шкале диоптрий «0,00» при свободно опоре линз и изменяется при вводе линзы в держатель.

### 6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Проверка диапазона измерений сферической вершинной рефракции совмещена с операцией определения абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции (см. п. 6.3.2)

Прибор считают прошедшим операцию поверки, если диапазон измерений сферической вершинной рефракции находится в пределах от минус 25 до плюс 25 дптр.

6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции осуществляется с помощью комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р).

При первичной поверке использовать сферические меры с номинальным значением задней вершинной рефракции:  $\pm 2,5$ ,  $\pm 5$ ,  $\pm 10$ ,  $\pm 15$ ,  $\pm 20$ ,  $\pm 25$  дптр ( $\pm 4$ ;  $\pm 20$ ;  $\pm 25$  дптр из комплекта КПП-2Р). При периодической поверке использовать сферические меры с номинальным значением задней вершинной рефракции:  $\pm 5$ ,  $\pm 20$  дптр ( $\pm 4$ ;  $\pm 20$  дптр из комплекта КПП-2Р).

Операцию проводить в следующей последовательности:

6.3.2.1 Проверить установки прибора.

Перейти от экрана измерений к экрану настроек:

- для моделей HLM-1, HLM-7000 нажать на левую кнопку на экране измерений монофокальных линз и на всплывающем меню нажать на правую кнопку – режим «настройки».

Для переключения экранов настроек, переход к необходимому параметру и выбор необходимой варианта параметра настройки используются иконки внизу экрана настроек.

- для модели HLM-9000 – выйти на режим измерений монофокальных линз. Внизу экрана появятся следующие иконки:



Нажать иконку справа и перейти в режим «настройки».

Необходимые параметры находятся в окнах настроек «MEASURE» - измерение и «DISPLAY» - отображение. Каждый из экранов имеет несколько страниц. Номера страниц отображены внизу экрана. Выбрать необходимое окно слева на экране. Переход по страницам и выбор необходимого параметра осуществляется нажатием соответствующей иконки на сенсорном экране.

Установить и проверить следующие параметры:

- «START MODE» «NORMAL» режим измерения обычных линз;
- «SINGL LENS» - «ON» включить режим измерения одиночных линз;
- «AVTO MSR NORMAL» функция автоматического запоминания – «OFF»;
- «ABBE» отображение постоянной ABBE - «NORMAL»;
- «CYLINDER MODE» - цилиндр (выбор знака цилиндра) - (MIX);
- «STEP S» - шаг (выбор шага измерений) – «0,01»;
- «PRISM DISPLAY» - призма (способ отображение параметров призмы) – «X-Y»;
- «WAVE LENGTH» - «e-line» отображение преломляющей способности относительно зеленой линии «e» ртутного спектра.

Перейти к экрану измерений: для моделей HLM-1, HLM-7000 нажать соответствующую кнопку внизу экрана, для модели HLM-9000 – нажать на иконку «BACK», расположенную наверху слева на экране.

6.3.2.2 Установить измеряемую меру из комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р) на крышку объектива (упор для линз) прибора и зафиксировать линзу держателем.

6.3.2.3 Провести точную регулировку.

Перемещением меры совместить оптический центр прибора и оптический центр измеряемой меры, т.е. добиться совмещения крестообразной метки и центра концентрических окружностей на экране измерений. Уточнить положение призмы по показаниям шкал («X-Y») на экране, добиваясь минимального смещения центра линзы от оптической оси. При полном совмещении нажать кнопку «MEM» для сохранения результатов измерения.

Результаты измерений отобразятся на экране, слева (или справа) от положения измерения.

6.3.2.4 Значение сферической вершинной рефракции (S), дптр, считать с экрана прибора и записать в протокол (Приложение А). Произвести пятикратные измерения сферической вершинной рефракции меры.

6.3.2.5 Провести обработку результатов измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011.

Рассчитать среднее арифметическое результатов измерений сферической вершинной рефракции меры  $X_{cp}$ , дптр, по формуле (1):

$$X_{cp} = \frac{\sum S_i}{n}, \quad (1)$$

где  $S_i$  –  $i$ -й результат измерений сферической вершинной рефракции, дптр;  
 $n$  – число измерений.

Рассчитать абсолютную погрешность измерений сферической вершинной рефракции  $\Delta s$ , дптр, по формуле (2):

$$\Delta s = X_{cp} - X_{s0}, \quad (2)$$

где  $X_{cp}$  – среднее арифметическое результатов измерений сферической вершинной рефракции, дптр,

$X_{s0}$  – значение задней вершинной рефракции меры, указанное в свидетельстве о поверке комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р), дптр.

Результаты записать в протокол.

*Внимание:* С помощью иконки CLEAR очистить экран и удалить данные измерений.

6.3.2.6 Повторить операции п.п. 6.3.2.2 - 6.3.2.5 для всех мер из комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р) со значениями задней вершинной рефракции, указанными в п. 6.3.2.

6.3.2.7 Прибор считают прошедшим операцию поверки, если рассчитанное значение абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции не превышает величины предела допускаемой абсолютной погрешности измерений  $\pm 0,06$  дптр в диапазоне от 0,00 до  $\pm 5,00$  дптр включ.; величины  $\pm 0,09$  дптр в диапазоне свыше  $\pm 5,00$  до  $\pm 10,00$  дптр включ.; величины  $\pm 0,12$  дптр в диапазоне свыше  $\pm 10,00$  до  $\pm 15,00$  дптр включ.; величины  $\pm 0,18$  дптр в диапазоне свыше  $\pm 15,00$  до  $\pm 20,00$  дптр включ.; величины  $\pm 0,25$  дптр в диапазоне свыше  $\pm 20,00$  дптр.

6.3.3 Проверка диапазона измерений призматического действия совмещена с операцией определения абсолютной погрешности измерений призматического действия (см. п. 6.3.4)

Прибор считают прошедшим операцию поверки, если диапазон измерений призматического действия находится в пределах от 2 до 10 пр дптр.

6.3.4 Определение абсолютной погрешности измерений призматического действия осуществляется с помощью комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р).

При первичной поверке использовать меры с номинальным значением призматического действия: 2, 5, 10 пр дптр. При периодической поверке использовать меры с номинальным значением призматического действия: 5 пр дптр (6 пр дптр комплекта КПП-2Р)

Операцию проводить в следующей последовательности:

6.3.4.1 Проверить установки прибора.

Перейти от экрана измерений к экрану настроек:

- для моделей НЛМ-1, НЛМ-7000 нажать на левую кнопку на экране измерений монофокальных линз и на всплывающем меню нажать на правую кнопку – режим «настройки».



Для переключения экранов настроек, переход к необходимому параметру и выбор необходимой варианта параметра настройки используются иконки внизу экрана настроек.

- для модели HLM-9000 – выйти на режим измерений монофокальных линз. Внизу экрана появятся следующие иконки:



Нажать иконку справа и перейти в режим «настройки».

Необходимые параметры находятся в окнах настроек «MEASURE» - измерение и «DISPLAY» - отображение. Каждый из экранов имеет несколько страниц. Номера страниц отображены внизу экрана. Выбрать необходимое окно слева на экране. Переход по страницам и выбор необходимого параметра осуществляется нажатием соответствующей иконки на сенсорном экране.

Установить следующие параметры:

- «STEP PRISM» - шаг (выбор шага измерений) – «0,01»;
- «PRISM DISPLAY» - призма (способ отображение параметров призмы) – «P/B».

Перейти к экрану измерений: для моделей HLM-1, HLM-7000 нажать соответствующую кнопку внизу экрана, для модели HLM-9000 – нажать на иконку «BACK», расположенную наверху слева на экране.

6.3.4.2 Установить меру из набора на крышку объектива (упор для линз) и зафиксировать держателем. Выровнять грань призмы столиком для линз (поджать). Результаты измерений отобразятся на экране, слева (или справа) от положения измерения.

6.3.4.3 Значение призматического действия (P), пр дптр, считать с экрана прибора и записать в протокол (Приложение А).

Произвести пятикратные измерения призматического действия меры.

*Внимание:* С помощь иконки «CLEAR» очистить экран и удалить данные измерений.

6.3.4.4 Провести обработку результатов измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011.

Рассчитать среднее арифметическое результатов измерений призматического действия меры  $X_{cp}$ , пр дптр, по формуле (3):

$$X_{cp} = \frac{\sum P_i}{n}, \quad (3)$$

где  $P_i$  –  $i$ -й результат измерений призматического действия, пр дптр;  
 $n$  – число измерений.

Рассчитать абсолютную погрешность результата измерений призматического действия  $\Delta_p$ , пр дптр, по формуле (4):

$$\Delta_p = X_{cp} - X_{p0}, \quad (4)$$

где  $X_{cp}$  – среднее арифметическое результатов измерений призматического действия, пр дптр,

$X_{p0}$  - значение призматического действия  $i$ -й меры, указанное в свидетельстве о поверке комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р), пр дптр.

Результаты записать в протокол.

6.3.4.5 Повторить операции п. п. 6.3.4.2 - 6.3.4.4 для всех мер призматического действия со значениями, указанными в п. 6.3.4.

*Внимание:* перед началом нового измерения необходимо удалить данные из памяти, нажав иконку с крестиком (удалить).

6.3.4.6 Прибор считают прошедшим операцию поверки, если рассчитанное значение абсолютной погрешности измерений призматического действия не превышает величины предела допускаемой абсолютной погрешности измерений  $\pm 0,125$  пр дптр в диапазоне от 0,5 до 5,0 пр дптр включ., величины  $\pm 0,25$  пр дптр в диапазоне свыше 5,0 до 10,0 пр дптр.

### 6.3.5 *Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра*

осуществляется с помощью сферической линзы с номинальным значением вершинной рефракции + 15,00 дптр из комплекта КПП-3Р (набора линз с перекрестием с номинальным значением вершинной рефракции  $\pm 8,00$  дптр из комплекта КПП-2Р)

#### 6.3.5.1 Проверить установки прибора.

Перейти от экрана измерений к экрану настроек:

- для моделей HLM-1, HLM-7000 нажать на левую кнопку на экране измерений монофокальных линз и на всплывающем меню нажать на правую кнопку – режим «настройки».

Для переключения экранов настроек, переход к необходимому параметру и выбор необходимой варианта параметра настройки используются иконки внизу экрана настроек.

- для модели HLM-9000 – выйти на режим измерений монофокальных линз. Внизу экрана появятся следующие иконки:



Нажать иконку справа и перейти в режим «настройки».

Необходимые параметры находятся в окнах настроек «MEASURE» - измерение и «DISPLAY» - отображение. Каждый из экранов имеет несколько страниц. Номера страниц отображены внизу экрана. Выбрать необходимое окно слева на экране. Переход по страницам и выбор необходимого параметра осуществляется нажатием соответствующей иконки на сенсорном экране.

Установить следующие параметры:

- «PRISM DISPLAY» - призма (способ отображение параметров призмы) – «X-Y».

Перейти к экрану измерений: для моделей HLM-1, HLM-7000 нажать соответствующую кнопку внизу экрана, для модели HLM-9000 – нажать на иконку «BACK», расположенную наверху слева на экране.

6.3.5.2 Установить линзу из набора на крышку объектива (упор для линз) прибора. Перемещением линзы совместить оптический центр прибора и ее оптический центр, т.е. добиться совмещения крестообразной метки и центра концентрических окружностей на экране измерений. Уточнить положение призмы по показаниям шкал («X-Y») на экране прибора, добиваясь минимального смещения оптического центра линзы от оптической оси.

В этом положении закрепляют линзу зажимом для линз и маркируют её маркировочным узлом. Центральная точка при маркировке определяет оптический центр линзы.

6.3.5.3 Повернуть линзу на  $180^\circ$ . Повторить операцию п. 6.3.5.2.

Расстояние между центрами маркировок измеряется с помощью лупы ЛИ-4-10<sup>x</sup>. Оно определяет погрешность нанесения оптического центра.

*Примечание:* Для линз с перекрестием измеряется с помощью лупы ЛИ-4-10<sup>x</sup> расстояние между перекрестием линзы и центром маркировки. Оно определяет погрешность нанесения оптического центра.

6.3.5.4 Процедуру нанесения отметок с последующим измерением расстояния между центрами маркировок повторяют не менее трех раз. Результаты заносятся в протокол.

6.3.5.5 Рассчитать абсолютную погрешность  $\Delta_o$ , мм, нанесения маркером оптического центра по формуле (5):

$$\Delta_o = X_{cp} , \quad (5)$$

где  $X_{cp}$  – среднее арифметическое результата измерений расстояния между центрами маркировок, мм;

$n$  – число измерений.

*Примечание:* Для линз с перекрестием абсолютная погрешность нанесения маркером оптического центра  $\Delta_o = X_{cp}$ , мм.

6.3.5.6 Повторить операции п.п. 6.3.5.2- 6.3.5.5 для всех номиналов линз с перекрестием, указанных в п. 6.3.5.

6.3.5.7 При использовании сферической линзы с номинальным значением вершинной рефракции + 15,00 дптр из комплекта КПП-3Р, прибор считают прошедшим операцию проверки, если рассчитанное значение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра не превышает удвоенного значения допускаемого отклонения -  $\pm 0,8$  мм.

При использовании набора линз с перекрестием с номинальным значением вершинной рефракции  $\pm 8,00$  дптр из комплекта КПП-2Р, прибор считают прошедшим операцию проверки, если рассчитанное значение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра не превышает  $\pm 0,4$  мм.

### 6.3.6 Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси

осуществляется с помощью астигматической линзы с номинальным значением цилиндрической рефракции 5 дптр со штрихом из комплекта КПП-3Р (призмы-клин 6,0 пр дптр со штрихом из комплекта КПП-2Р)

6.3.6.1 Астигматическую линзу (призму-клин 6,0 пр дптр) устанавливают на крышку объектива (упор для линз) стороной без штриха, прижимая её длинной гранью к упору для оправы (поджать). Штрих, нанесённый на астигматической линзе, определяет положение главного меридиана (положение основания призмы). Установить линзу таким образом, чтобы значение оси меридиана (оси призмы) определилось на экране, при этом астигматическая линза (призма-клин) должна упираться в упор для оправ. В этом положении астигматическую линзу (призму-клин) маркируют маркировочным узлом.

6.3.6.2 С помощью лупы ЛИ-4-10<sup>x</sup> измерить расстояния  $L_1$  и  $L_3$ , мм, от нанесенных крайних точек маркировки до штриха на астигматической линзе (призме-клин). Данные записать в протокол.

6.3.6.3 Процедуру нанесения сечения с последующим измерением производят не менее трех раз.

6.3.6.4 Рассчитать абсолютную погрешность нанесения маркером оси  $\Delta$ , ...°, по формуле (6):

$$\Delta = \frac{\sum_{i=1}^n (\arctg|L1 - L3|/d)}{n} \quad (6)$$

где  $d$  – расстояние между крайними точками маркировочного узла,  $d=33$  мм;  
 $n$  – число измерений.

6.3.6.5 Прибор считают прошедшим операцию поверки, если рассчитанное значение абсолютной погрешности нанесения маркером оси не превышает  $\pm 1^\circ$ .

## 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки заносятся в протокол, который хранится в организации, проводившей поверку (см. приложение А к настоящей методике поверки).

7.2 Если диоптриметр автоматической модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000 прошел поверку с положительным результатом, он признается годными и допускается к применению.

7.2.1 Результаты поверки оформляются свидетельством о поверке; наносится знак поверки в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

7.2.2 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке диоптриметра автоматического модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000.

7.3 Если диоптриметр автоматической модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000 прошел поверку с отрицательным результатом, он признается непригодным, не допускается к применению, и на него выдается извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

**Приложение А**  
к методике поверки МП 032.М44-19  
«ГСИ. Диоптриметры автоматические  
модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000.  
Методика поверки»

## ПРОТОКОЛ

**Первичной/периодической поверки** от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Средство измерения: «Диоптриметр автоматический модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000»

Наименование СИ, тип (если в состав СИ входят несколько автономных блоков)  
Заводской № \_\_\_\_\_ №/№ \_\_\_\_\_  
Заводские номера бланков

№/№ \_\_\_\_\_  
Принадлежащее \_\_\_\_\_  
Наименование юридического лица, ИНН, КПП

Поверено в соответствии с методикой поверки МП 032.М44-19 «ГСИ. Диоптриметры автоматические модели HLM-1, HLM-7000, HLM-9000. Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИОФИ»  
Наименование документа на поверку, кем утвержден (согласован), дата

С применением эталонов: \_\_\_\_\_  
(наименование, заводской №, разряд, класс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов \_\_\_\_\_  
Температура °С \_\_\_\_\_  
Влажность % \_\_\_\_\_  
Давление кПа \_\_\_\_\_  
(приводят перечень и значения влияющих факторов, нормированных в методике поверки)

Внешний осмотр: \_\_\_\_\_  
Опробование: \_\_\_\_\_  
Версия ПО: \_\_\_\_\_

Получены результаты поверки метрологических характеристик:  
**Проверка диапазона измерений сферической вершинной рефракции, дптр\***

### **Определение абсолютной погрешности измерения сферической вершинной рефракции, дптр**

Номинальное значение, дптр	Действительное значение, дптр	Измеренное значение, дптр	Абсолютная погрешность измерений, дптр
2,5*			
5(4)			
10*			
15*			
20			
25*			
- 2,5*			
- 5 (- 4)			

- 10*			
- 15*			
- 20			
- 25*			

\* - только первичная поверка

**Проверка диапазона измерений призматического действия, пр дптр\***

**Определение абсолютной погрешности измерений призматического действия, пр дптр**

Номинальное значение, пр дптр.	Действительное значение, пр дптр.	Измеренное значение, пр дптр.	Абсолютная погрешность измерений, пр дптр
2*			
5 (6)			
10*			

\* - только первичная поверка

**Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра, мм**

**Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси, °**

--

Рекомендации:

Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Исполнители \_\_\_\_\_

Подписи, Ф.И.О., должность